

Bedienungsanleitung Pistolenwärmer | A.I. Gunwarmer

❖ Anzeigeleuchten

• TEMP Anzeige

- Δ Blinkt die Anzeige langsam, ist die Temperatur zu niedrig (unter 30°C).
- Δ Leuchtet die Anzeige konstant, ist die Temperatur OK (zwischen 30 und 36°C).
- Δ Blinkt die Anzeige schnell, ist die Temperatur zu hoch (über 36°C).

• BATT Anzeige

Wenn die BATT Anzeige leuchtet, muss das Gerät zum Aufladen angeschlossen werden. Die Anzeige leuchtet 10 bis 15 Minuten, bevor sich das Heizsystem ausschaltet. Kurz nachdem das Heizsystem ausgeht, fängt die TEMP Leuchte an, langsam zu blinken, was bedeutet, dass die Temperatur im Gerät zu gering ist. Daher empfehlen wir, das Gerät bei Nichtnutzung im ausgeschalteten Zustand immer an den Netzstecker zum Aufladen anzuschließen.

Aufladen des Gerätes (das Gerät muss beim Laden ausgeschaltet sein!)

In dem Gerät sind **wiederaufladbare Batterien** eingebaut. Diese können mit dem **Netzstecker** wieder aufgeladen werden. Stecken Sie dazu den Stecker in den vorgesehenen Anschluss, welcher sich innerhalb der Tasche auf der rechten Vorderseite des Gerätes befindet. Der Gunwarmer kann außerdem mit dem **Stecker für Zigarettenanzünder im Auto** betrieben werden. Stecken Sie diesen in den externen Akku des Pistolenwärmers. **Wichtig ist, dass das Gerät vor jedem Aufladen (ob über Netzstecker oder Zigarettenanzünder) auf OFF geschaltet ist.** Sonst wird die Batterie verbraucht und das Gerät kann nicht geladen werden. Die BATT Anzeige wird während des Aufladens blinken und wenn der Vorgang beendet ist, konstant leuchten. Eine leere Batterie kann 14 Stunden zum Aufladen benötigen.



❖ Inbetriebnahme

Schalten Sie das Gerät an und warten Sie, bis die Temperatur Anzeige (TEMP) aufhört zu blinken und konstant leuchtet. Dann ist der Pistolenwärmer einsatzbereit. Wenn die Batterie leer ist, leuchtet die BATT Anzeige auf.

❖ Hygienetasche

Die Hygienetasche garantiert, dass die Pistolen korrekt im Pistolenwärmer platziert werden. Benutzen Sie den Pistolenwärmer niemals ohne die Hygienetasche. Schließen Sie alle drei Druckknöpfe für eine korrekte Funktion. Da sich das Heizsystem im unteren Teil des Pistolenwärmers befindet, müssen Sie die Besamungspistolen bis ganz unten durchschieben.

Wenn der Pistolenwärmer warm ist, bildet die Hygienetasche eine gute Umwelt für bakterielles Wachstum. Diese Bakterien können auf die Kuh übertragen werden sowie Spermien schädigen. Halten Sie die Hygienetasche daher **immer sauber und trocken**.



Reinigung

Die Hygienetasche kann herausgenommen und maschinell gewaschen werden. Waschen Sie diese mit heißem Wasser sowie Desinfektionsmittel. Waschen Sie einzelne Stellen des restlichen Pistolenwärmers mit Wasser und Seife. Wenn nötig, kann Alkohol zum Desinfizieren genutzt werden. Nachdem die Hygienetasche und der Rest des Pistolenwärmers gewaschen ist, vergewissern Sie sich, dass die Hygienetasche vollständig trocken ist, bevor Sie sie wieder in den Pistolenwärmer legen.

Denken Sie auch daran, die Besamungspistolen regelmäßig gründlich zu reinigen und im trockenem Zustand wieder in den Pistolenwärmer zurück zu stecken.

❖ Empfehlung

Sobald der Pistolenwärmer nicht mehr in Gebrauch ist, schließen Sie ihn im ausgeschalteten Zustand an den Netzstecker an, sodass das Gerät immer vollgeladen und somit optimal funktionieren kann. Bewahren Sie den Pistolenwärmer immer trocken bei Temperaturen zwischen 10°C und 30°C auf.

❖ Achtung

Bewahren Sie den Pistolenwärmer niemals im Sommer oder Winter im Auto auf. Extreme Temperaturen (Hitze oder Frost) schaden den Batterien. Bei Überhitzung blinkt die TEMP Anzeige sehr schnell und das Gerät sollte vor der nächsten Nutzung Zeit zum Abkühlen erhalten.

Bei Fragen:

Büro Alta Deutschland GmbH
Altes Dorf 1 | 29525 Uelzen
Tel.: +49 (0) 581 – 97150
Mail: info@altagenetics.de